

ПУЛЬСОКСИМЕТР

МОДЕЛЬ С101 АЗ

ОПИС

- Індикатор заряду батареї.
- Автономичне вимкнення приладу через 8 секунд.
- Компактний розмір, маленька вага, зручний у використанні.
- Поворот дисплею: 4 орієнтації, 6 режимів.
- Габаритні розміри (мм): 55x38x34. Вага – 51 г.

Щоб змінити режим очікування на режим роботи, утримуйте кнопку доки не зміниться інтерфейс дисплея.



НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ

При затисканні кнопки живлення (3 сек.) на екрані з'явиться меню з налаштуваннями пульсоксиметра, а зміна параметрів проводиться подальшим утриманням кнопки в перебігу нетривалого часу:

Alm - включення оповіщення - варіанти: ON / OFF;

DIR - перемикання змін параметрів - варіанти: UP / DOWN (збільшення / зменшення параметрів);

SpO2 High - максимальне значення вимірювання SpO2 - від значення SpO2 Low +1 до 99;

SpO2 Low - мінімальне значення вимірювання SpO2 - від 70 до значення SpO2 High -1;

PR High - максимальне значення вимірювання частоти серцебиття - від PR Low +1 до 250;

PR Low - мінімальне значення вимірювання частоти серцебиття - від 25 до PR High -1;

Default - при тривалому утриманні кнопки на цьому пункті меню відбувається скидання налаштувань до заводського значення: Alm - Off, DIR - UP, SpO2 High - 99, SpO2 Low - 90, PR High - 120, PR Low - 50;

Exit - вихід з меню налаштувань.

Важливо!

- Використовуючи прилад поза приміщенням або при яскравому освітленні, необхідно підвищити рівень яскравості дисплея для кращої видимості.
- Для економії заряду батареї краще використовувати більш низький рівень яскравості дисплея.


ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ВИКОРИСТАННЯ

- Вставте батареї AAA
- Вставте палець в прорезинений отвір пульсоксиметра нігтьовою пластиною догори.
- Натисніть кнопку на передній панелі приладу.
- Не рухайте пальцем і не змінюйте положення тіла доки триває діагностика.
- Натисніть кнопку, якщо хочете змінити режим відображення.
- Прочитайте результати дослідження на екрані.
- Прилад автоматично вимкнеться через 8 секунд, якщо немає сигналу для діагностики.

Зауваження: Використовуйте спирт для дезінфекції прорезиненої поверхні перед кожним дослідженням, а також дезінфікуйте спиртом палець до та після кожного дослідження. (Матеріал прорезиненої поверхні пульсоксиметра не містить токсинів, не шкідливий та не викликає алергічних реакцій).

ХАРАКТЕРИСТИКА:

- Тип дисплея: TFT;
- SpO2: діапазон вимірювання 70% ~ 99%
Точність вимірювання: SpO2 80-99%, ±1%,
70-80%, ±2%,
≤70% без визначення.
- PR Діапазон вимірювання (частоти серцебиття):
30bpm ~ 240bpm
Точність ± 2%;
- Живлення: від 2 x AAA батареек.
- Оповіщення про критичні значення: звуковий сигнал;
- Відображення пульсації: діаграма;
- Індикатор заряду батареї: е;
- Електроспоживання: менше 40 мА;
- Автоматичне вимкнення: пристрій вимикається автоматично, якщо в ньому немає пальця протягом 8 секунд;
- Робоча температура: 5 ° C ~ 40 ° C
відносна вологість 15% -80%;

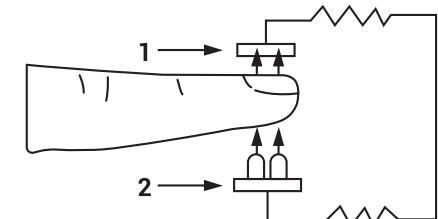

Гарантійний термін експлуатації – 12 місяців від дати продажу у роздрібній мережі.



Виробник: Shenzhen IMDK Medical Technology Co. LTD
Floor 10, HaiCheng Bldg; YuanShan IndZone, Goming District,
Shenzhen, Guangdong, P.R.China

Шеньчжень ІМДК Медікал Технологік Ко., ЛТД.
Флор 10, ХайЧенг Блдг; Яншан ІндЗон, Гомінг Дістрікт,
Шеньчжень, Гуандун, Китайська Народна Республіка

Імпортер:

ТОВ «Торговий Дім «Віктер Плюс»
04210, Україна, м. Київ, пр-т Героїв Сталінграда, буд. 2-Г, корп. 1
Телефон: (044) 581-11-42
e-mail: sale@voles.com.ua
www.voles.com.ua

Дата випуску: 20.10.2020

