

Нажимной дозатор GMD-500 A/F

Руководство по эксплуатации

GMD-500 A/F


Благодарим за покупку нажимного дозатора GMD-500 A/F.
Рекомендуем внимательно ознакомиться с данной инструкцией перед началом работы.

Комплектующие

- Винты и анкеры (по 3 шт.)
- Заливной флакон (1 шт.)
- Руководство по эксплуатации (1 шт.)

Аксессуары (продаются отдельно)

- Двусторонний скотч 1 шт.
- Помпа для мыла 1 шт.
- Помпа для антисептика 1 шт.

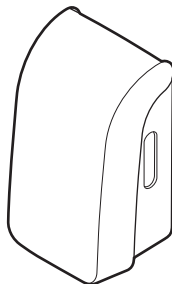

Меры предосторожности

Внимательно прочитайте раздел **меры предосторожности** перед использованием дозатора. Эти меры специально разработаны для Вашей защиты и требуют обязательного исполнения.

Данное руководство должно быть доступно для последующего использования после прочтения.

Степень риска

Значение символа

 ОПАСНО	Использование не по назначению может привести к серьезным травмам (1*) или смерти	 Строго запрещено
 ВНИМАНИЕ	Использование не по назначению может привести к травмам (2*) и/или материальному ущербу (3*)	 Обратите внимание

(*1) К серьезным травмам относятся: потеря зрения, ожоги (I, II и III степени), поражение электрическим током, переломы костей или отравление организма, полученные в результате воздействия и требующие госпитализации или длительного лечения.

(*2) Травмы, перечисленные в (*1), но не требующие госпитализации или длительного лечения.

(*3) Включает значимый ущерб интерьеру помещения.

Меры предосторожности

Меры предосторожности при установке

ОПАСНОСТЬ



Не использовать устройство не по назначению.

Использование не по назначению может привести к серьезным травмам.



Не устанавливайте в пыльных местах или зонах с повышенной влажностью.

Может привести к неисправности дозатора.



Не устанавливайте перед открытым огнем или источником искр.

Может привести к пожару.



Не устанавливайте в местах, где дозатор может подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или высоких температур.

Может привести к неисправностям или пожару.



Помещение должно быть хорошо вентилируемым. При использовании спиртовых дезинфицирующих средств помещение необходимо проветривать.

При недостаточной вентиляции пары концентрируются в комнате, что создает угрозу пожара или может вызвать отравление персонала



Устанавливайте дозатор только на прочной и устойчивой вертикальной поверхности.

Если вы используете двусторонний скотч, не устанавливайте дозатор на неровных шероховатых поверхностях или окрашенных стенах.

Неправильная установка может привести к повреждению дозатора или к травмам.

Меры предосторожности при использовании

ОПАСНОСТЬ



Никогда не устанавливайте данный продукт вблизи источников открытого пламени (свечи, благовония, свечи для отпугивания насекомых или сигареты).

Может привести к неисправности дозатора.



Не обрабатывайте дозатор сильнодействующими моющими средствами.

Возможно повреждение пластика с потерей внешнего вида.



Используйте химические средства, рекомендованные компанией Saraya.

Использование других средств может вызвать повреждение дозатора.



Ознакомьтесь с информацией по безопасности химического средства, чтобы корректно его использовать.

Меры предосторожности

Меры предосторожности при использовании

ОПАСНО



Никогда не вдыхайте пары спиртосодержащих дезинфицирующих средств.

Спирт может вызвать раздражение носоглотки.



Не подходите близко к огню, если ваши руки обработаны спиртовым антисептиком.

Это может привести к пожару и серьезным ожогам.



Избегайте пролива химического средства при обращении с ним. Пролитый раствор необходимо немедленно убрать.

Химическое средство, пролитое на пол, может вызвать изменение цвета поверхности или ее повреждение. При проливе пол становится скользким, что может привести к ушибам при падении.

ОСТОРОЖНО



Не размещайте посторонние предметы на поверхности дозатора.

Дозатор может упасть и повредиться.



Не роняйте и не подвергайте сильному воздействию.

Неаккуратное обращение может привести к повреждению дозатора или вызвать пожар.



Берегите пальцы, когда закрываете крышку дозатора.

Может привести к травмам.



Если вы не собираетесь использовать дозатор долгое время, то необходимо протереть его поверхность и вынуть бутылку.

Может привести к испарению спиртовых средств, а также явиться причиной пожарной ситуации.



Проводите регулярный осмотр.

Для безопасного и качественного функционирования дозатора необходимо проводить его регулярную проверку и очистку.



Не устанавливайте в дозатор полностью заполненный флакон с мылом или антисептиком.

Средство может разлиться, что, в свою очередь, может привести к повреждению дозатора.

Меры предосторожности при переустановке и ремонте

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Дозатор может быть разобран, подвергнут ремонту или модифицирован только сертифицированным специалистом.

В противном случае дозатор может быть выведен из строя. Если у Вас возникли какие-либо вопросы, свяжитесь с торговым представителем.

Меры предосторожности

Меры предосторожности



ВНИМАНИЕ



Выполняйте все требования законодательства Вашей страны и местные правила при утилизации дозатора.

Спецификация

Параметр	Данные
Наименование	Нажимной дозатор
Модель	GMD-500 A / GMD-500 F
Размеры (Ш x Г x В, мм)	122 x 102 x 224
Масса	около 320 г (без упаковки, комплектующих и бутылки)
Материал	Крышка: PP, Корпус: PP, Дозирующий клапан: POM
Рабочая температура	5~40° C (для правильной консистенции химического средства)
Рабочая влажность	20~85 (без конденсации влаги)
Химические средства для дозирования*	GMD-500 F: пенящееся мыло GMD-500 A: антисептик
Объём	500 мл
Дозировка и расход средств	GMD-500 F: 1 мл/дозирование GMD-500 A: 1,5 мл/дозирование

* Использование химических средств, не рекомендованных компанией Saraya, может вывести дозатор из строя или нанести ущерб здоровью персонала.



*Технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

Установка

Инструменты для установки


- Сверло 6 мм
- Сверло 2,5 мм
- Электродрель
- Крестовая отвертка
- Измерительная лента, линейка
- Молоток

Размеры

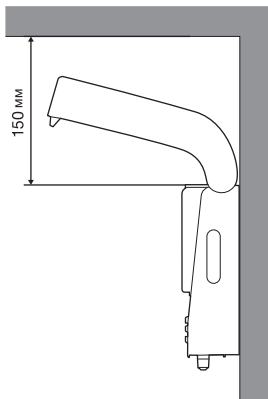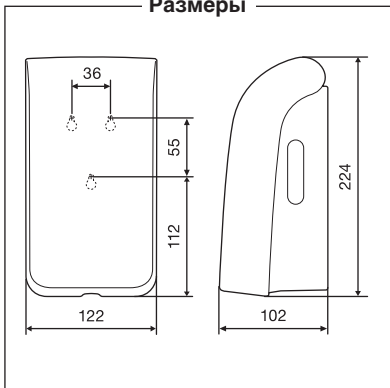


Установка

※ Метод установки дозаторов GMD-500 A и GMD-500 F

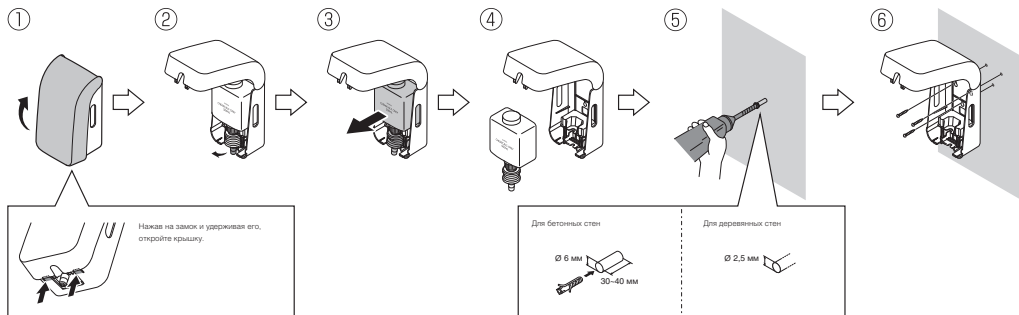

Установка


Установка с использованием двустороннего скотча

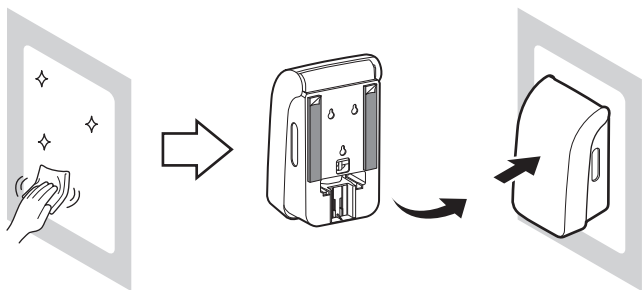


Протрите поверхность, на которую будет установлен дозатор, и дайте высохнуть в течение 10 мин.

Наклейте двусторонний скотч на заднюю поверхность дозатора, снимите защитную пленку и прижмите дозатор к стене на 10 секунд для лучшего закрепления на стене. Необходимо подождать 24 часа прежде, чем устанавливать заливной флакон с мылом или антисептиком в дозатор.

Заправка флакона мылом

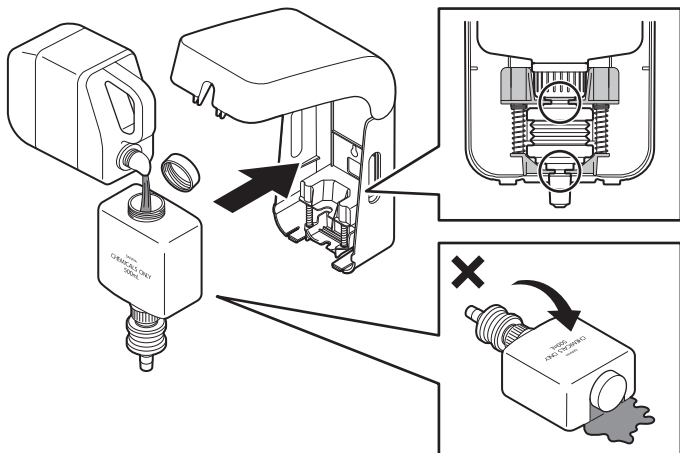

GMD-500F

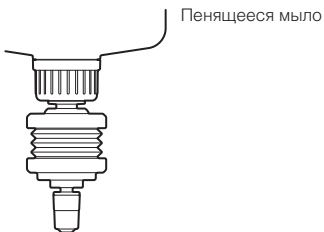


GMD-500A




Использование

GMD-500F

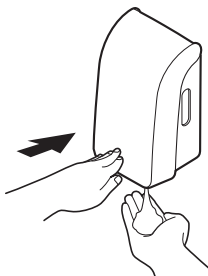

GMD-500A

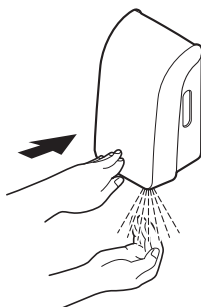

Обслуживание

Для обеспечения надежной работы устройства, пожалуйста, соблюдайте правила ухода за дозатором. Устраняйте любые загрязнения с помощью мягкой сухой ткани. Сильные загрязнения необходимо обработать нейтральным моющим средством с водой, затем протереть влажной тканью и высушить.

Внимание Запрещено использовать следующие средства для ухода за дозатором:

Растворители, бензол, бензин, стиральный и чистящий порошки, агрессивные моющие средства, кипяток, кислоты, щелочные агенты, щетки и т.д.

Соблюдайте инструкцию, когда используете химически обработанные ткани.

Чистка распыляющего носика помпы

Если распыляющий носик засоряется, то это приводит к неправильному дозированию средства или выходу дозатора из строя. Процедура чистки носика:


1. Погрузите конец распыляющего носика в горячую воду (70–80°C) на 2 минуты.
* Если распыляющий носик остается засоренным после погружения в горячую воду, вставьте тонкую иголку или булавку (диаметром менее 0.5 мм) и прочистите носик.
2. Убедитесь, что помпа работает должным образом.

Внимание


- При чистке распыляющего носика с помощью иглы, будьте осторожны, чтобы не повредить внутренние части помпы.
- Будьте осторожны при обращении с горячей водой.
- * Если дозатор продолжает распылять средство неправильно, пожалуйста, замените бутылку и помпу.

Обслуживание

1

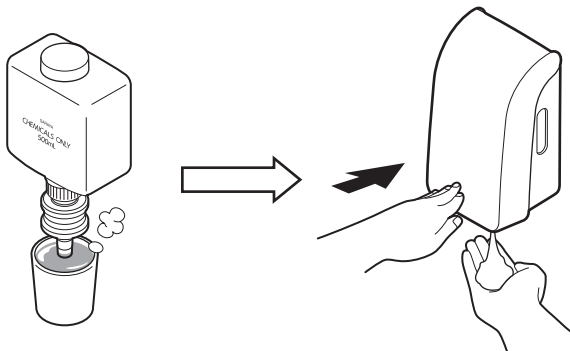

2

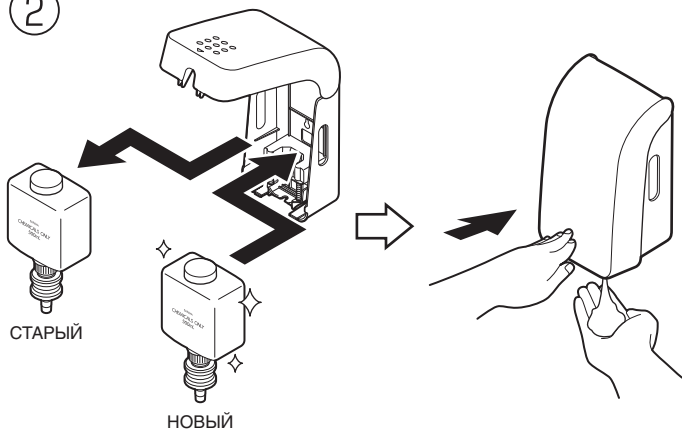

Перед звонком в службу ремонта

При подозрении на поломку проверьте следующее:

Неисправность	Проверить
Дозатор не распыляет средство.	● Есть ли утечка химического средства? ● Засорен ли носик? ● Правильно ли установлена бутылка?

Проверьте пункты, упомянутые в вышеприведенной таблице. Если после этого дозатор не работает, свяжитесь с торговым представителем Вашего региона и не предпринимайте каких-либо попыток починить устройство самостоятельно.

Saraya Co., Ltd.

2-2-8 Yuzato, Higashisumiyoshi-ku, Osaka 546-0013, Japan
Phone: +81-6-6703-6556, Fax: +81-6-6703-4466
www.saraya.com/english, e-mail: hands@saraya.com

ООО «Сарая Украина»

04080, Киев, ул. В.Хвойки, д. 21, Украина,
информационная поддержка: +38 (044) 3381600
www.saraya.com.ua, info@saraya.com.ua