

Вагісан®

UA

ІНСТРУКЦІЯ
по застосуванню медичного виробу
Вагісан®
зволожуючий гель для інтимної гігієни

СКЛАД:
молочна кислота, пропіленгліколь, гідроксиетилцелюлоза, сорбат калію, вода очищена.

ОПИС: Злегка жовтуватий прозорий гель.

НАЗВА І МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ВИРОБНИКА.
Ядран-Галенський Лабораторій д.д., Свільно 20, 51000 Рієка, Хорватія.
Jadran-Galenski Laboratorij d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Croatia.

ВЛАСТИВОСТІ:
Вагісан® зволожуючий гель для інтимної гігієни використовується для зволоження інтимної зони. Гель запобігає дискомфорту, викликаному сухістю, і забезпечує довгострокову і оптимальну вагінальну вологу. Він ніжний і нешкідливий для використання. Гель містить молочну кислоту, яка сприяє нормалізації кислотного рівню рН в піхві.

Існує безліч причин, що викликають сухість інтимної області. Як правило, сухість з'являється у жінок літнього віку. Вагінальна сухість нерідко зустрічається і у молодих жінок, вона, як правило, є наслідком різного роду фізичних і психологічних навантажень, незадоволеності і глибокого стресу. Сухість і супутні їй симптоми можуть послужити причиною дискомфорту під час статевого акту. Якщо ж вагінальна область змазана гелем, інтимний контакт стає простіше і приносить задоволення.

130001806/04

Сухість усувається відразу ж після нанесення, забезпечуючи тривале відчуття м'якості і зволоженості. Гель не залишає плям на одязі і легко змивається водою.

Вагісан® зволожуючий гель для інтимної гігієни застосовується: для запобігання відчуття дискомфорту, викликаного сухістю піхви та забезпечує тривале і оптимальне зволоження.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:

Видавити невелику кількість гелю на чистий палець і нанести на інтимну зону. Для більш глибокого нанесення гелю в піхву, застосуйте аплікатор, що додається. Для заповнення аплікатора треба прикласти його до отвору туби і видавити невелику кількість гелю, відокремити аплікатор від туби, вставити його в піхву і видавити гель. Аплікатор може бути використаний необмежену кількість разів, відповідно до потреби. Після застосування промийте аплікатор в теплій воді, ретельно витріть і тримайте в сухому місці.

Вагісан® гель також можна наносити тонким шаром на пеніс або на зовнішню поверхню презерватива або використовувати для полегшення введення ректальних термометрів і клізм.

ПРОТИПОКАЗАННЯ.

Підвищена чутливість до окремих компонентів геля.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. Зберігати при температурі не вище 25 °С в недоступному для дітей місці.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ. 2 роки.

УПАКОВКА.

50 г (г) в тубі, 1 туба разом з насадкою в картонній коробці.

26mm

26mm

23mm

23mm

26mm

26mm

104

104

Approved for printing
Kukhgar Tatiana
14.03.2019

Вагісан®

УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК ВИРОБНИКА В УКРАЇНІ:
Представництво «Ядран - Галенська Лабораторія д.д.»
01015, м. Київ, вул. Лаврська 16
Тел.+38 (044) 377-54-16
<http://vagisan.com.ua/>

Дата останнього перегляду:

Пояснення символів на упаковці:

 Слід ознайомитись з інструкцією по застосуванню.

 Виробник

 Партія № :

 Застосовувати до:

 Знак CE

**Інформація про інші продукти лінійки «Вагісан®»**

ПРОДУКТ	ВЛАСТИВОСТІ	ЗАСТОСУВАННЯ
Вагісан®, капсули пероральні № 15	Пероральний пробіотик, який сприяє відновленню та підтримує природний баланс вагінальної мікрофлори	Вагісан® може бути використаний для жінок і дівчаток з 12 років з метою підтримки нормального балансу вагінальної мікрофлори: • після перенесених захворювань, • під час та після лікування антибіотиками та іншими лікарськими засобами.
Вагісан®, засіб для інтимної гігієни, 250 мл	Засіб для інтимної гігієни підтримує кислотно-лужний баланс і захисні властивості слизових оболонок інтимних зон, також сприяє збереженню нормальної флори вагінального середовища.	Використовується для гігієни інтимних зон жінок. Особливо рекомендується під час менструації, вагітності та післяпологовий період. Завдяки природним компонентам (екстракт календули та ромашки) може використовуватися для дітей раннього віку.

26mm

26mm

23mm


23mm

26mm

26mm

603



KUTIJA UPUTA ETIKETA TUBA	BOJE:		
VAGISAN gel, UKRAINA	Crna	<input checked="" type="checkbox"/> 1. ispravka Date: 14.03.2019	<input type="checkbox"/> 7. ispravka Date:
		<input type="checkbox"/> 2. ispravka Date:	<input type="checkbox"/> 8. ispravka Date:
ŠIFRA VERZIJA		<input type="checkbox"/> 3. ispravka Date:	<input type="checkbox"/> 9. ispravka Date:
DATUM		<input type="checkbox"/> 4. ispravka Date:	<input type="checkbox"/> 10. ispravka Date:
DIMENZIJA		<input type="checkbox"/> 5. ispravka Date:	<input type="checkbox"/> 11. ispravka Date:
FARMACODE		<input type="checkbox"/> 6. ispravka Date:	<input type="checkbox"/> 12. ispravka Date:
VIZUALNI KOD			
EAN KOD			
FONT	Arial		
PRIPREMA	Adobe Illustrator CS6		
Ne printa se			
Štanca			
Bez laka			
Brail			