

АКВА МАРИС® СТРОНГ



ІНСТРУКЦІЯ По застосуванню назального спрею

СКЛАД:

Гіпертонічний стерильний розчин морської води Адріатичного моря з натуральними солями та мікроелементами.

ОПИС: Прозора безбарвна рідина без запаху із солоним присмаком.

ФОРМА ВИПУСКУ: спрей назальний.

По 30 мл у флаконі з дозуючим пристроєм; 1 флакон у картонній коробці.

НАЗВА І МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ВИРОБНИКА.

Ядран-Галенський Лабораторій д.д., Свільно 20, 51000 Рієка, Хорватія.
Jadran-Galenski Laboratorij d. d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Croatia.

ВЛАСТИВОСТІ:

- Аква Маріс® Стронг знімає закладеність носа та полегшує дихання;
- Засіб Аква Маріс® Стронг забезпечує зменшення набряку слизової оболонки порожнини носа завдяки видаленню надлишкової рідини з міжклітинного простору за рахунок різниці осмотичного тиску;
- Аква Маріс® Стронг призводить до механічного очищення слизової оболонки від пилу, слизових виділень та інших патогенних факторів (бактерій, алергенів, вірусів), діючих на слизову оболонку;
- При запальних захворюваннях носа з рясним утворенням слизу і слизово-гнійних виділень використання засобу Аква Маріс® Стронг сприяє більш швидкій евакуації слизу, тим самим зменшує місцевий запальний процес та знижує ризик ускладнень;
- Розріджує слиз та нормалізує його вироблення в слизовій оболонці носової порожнини;
- Покращує функцію миготливого епітелію, що посилює опірність слизової оболонки порожнини носа і додаткових пазух до проникнення патогенних бактерій і вірусів.

АКВА МАРИС® СТРОНГ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ:

- для зменшення набряку слизової оболонки носа та покращення носового дихання як самостійний або допоміжний засіб;
- при гострих та хронічних захворюваннях носа (риніти, синусити, аденоїдити, тощо);
- для розрідження та поліпшення відтоку густого слизу при застудних та алергічних захворюваннях носа;
- для зменшення місцевого запального процесу та зниження ризику ускладнень.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:

Аква Маріс® Стронг, спрей назальний, застосовують дорослим та дітям віком від 1 року – по 1-2 впорскування в кожен носовий хід 3-4 рази на добу.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ:

Засіб Аква Маріс® Стронг можна застосовувати під час вагітності або годування груддю. Не застосовувати дітям віком до 1 року. Не застосовувати при підвищеній чутливості до компонентів засобу.

Засіб Аква Маріс® Стронг не викликає звикання.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ. 3 роки.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. Не потребує спеціальних умов зберігання.

УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ:

ПРЕДСТАВНИЦТВО „ЯДРАН - ГАЛЕНСЬКА ЛАБОРАТОРІЯ д.д.“, м. Київ, 01015, вул. Лаврська 16, тел.: (044) 3775416 (17).

Дата останнього перегляду: 30.05.2019

130002114/04

Інформація про медичні вироби з продуктової лінійки Аква Маріс®:

ПРОДУКТ	ВІК, З ЯКОГО МОЖНА ЗАСТОСОВУВАТИ ПРОДУКТ	ПРИЗНАЧЕННЯ	СКЛАД
Аква Маріс® краплі назальні 10 мл	З перших днів життя	Зволоження та очищення слизової оболонки носа	Ізотонічний стерильний розчин морської води Адріатичного моря з натуральними солями та мікроелементами.
Аква Маріс® Бебі, краплі назальні 10 мл	З перших днів життя	Зволоження та очищення слизової оболонки носа	Ізотонічний стерильний розчин морської води Адріатичного моря з натуральними солями та мікроелементами.
Аква Маріс® Алерджі назальний спрей 20 мл	З двох років	Полегшення симптомів алергічного риніту	Розчин морської солі Адріатичного моря, ектоїн, вода очищена.
Аква Маріс®, назальний спрей 30 мл	З одного року	Очищення, захист та зволоження слизової оболонки носа	Ізотонічний стерильний розчин морської води Адріатичного моря з натуральними солями та мікроелементами, вода очищена.
Аква Маріс® Класік, назальний спрей 30 мл	З одного року	Очищення, захист та зволоження слизової оболонки носа	Ізотонічний стерильний розчин морської води Адріатичного моря з натуральними солями та мікроелементами, вода очищена.
Аква Маріс®, назальний спрей 50 або 150 мл	З одного року	Видалення слизових виділень та полегшення дихання	Ізотонічний стерильний розчин морської води Адріатичного моря з натуральними солями та мікроелементами, вода очищена.
Аква Маріс® Інтенсив, назальний спрей 50 або 150 мл	З одного року	Видалення слизових виділень та полегшення дихання	Ізотонічний стерильний розчин морської води Адріатичного моря з натуральними солями та мікроелементами, вода очищена.
Аква Маріс® Прополіс, спрей для горла та порожнини рота 150 мл	З трьох років	Усунення подразнення слизової оболонки горла та порожнини рота	Морська вода Адріатичного моря; екстракт прополісу, гліцерин, вода очищена.
Аква Маріс® Екстра Стронг, назальний спрей 150 мл	З одного року	Інтенсивне промивання, усунення набряку та закладеності носа	Гіпертонічний розчин морської води Адріатичного моря з натуральними солями та мікроелементами, вода очищена.
Аква Маріс®, спрей для горла 30 мл	З трьох років	Зменшення подразнення горла та ротової порожнини	Гіпертонічний стерильний розчин морської води Адріатичного моря з натуральними солями та мікроелементами.
Аква Маріс® Бебі Інтенсив, назальний спрей 50 або 150 мл	З першого місяця життя	Інтенсивне промивання носа, видалення надмірної кількості слизу та полегшення дихання	Ізотонічний стерильний розчин морської води Адріатичного моря з натуральними солями та мікроелементами.
Аква Маріс®, Плюс, назальний спрей 30 мл	З одного року	Очищення, зволоження та відновлення слизової оболонки носа	Ізотонічний стерильний розчин морської води Адріатичного моря з натуральними солями та мікроелементами, декспантенол.
Аква Маріс® морська сіль, 30 пакетів - саше	З п'яти років	Зручне промивання порожнини носа в домашніх умовах у дітей та дорослих. Дбайливо та ніжно очищує ніс, видалює надлишок слизу.	Натуральна морська сіль без добавок.
Аква Маріс®, система для промивання носу в комплекті з морською сіллю в пакетах-саше			Ємність для промивання носа в комплекті з натуральною морською сіллю.
Аква Маріс®, збагачена морська сіль, 30 пакетів-саше			Натуральна морська сіль, збагачена ефірними маслами мирта і безсмертника.
Аква Маріс®, система для промивання носу в комплекті з морською сіллю в пакетах-саше			Ємність для промивання носа в комплекті з натуральною морською сіллю, збагаченою ефірними маслами мирта і безсмертника.

Пояснення символів на упаковці:

- Слід ознайомитись з інструкцією по застосуванню.
- Виробник Партія №
- Використовувати до:
- Стерильно



KUTIJA	UPUTA	ETIKETA	TUBA
AQUA MARIS strong, UKRAINA			
	ŠIFRA	130002114	
	VERZIJA	4	
	DATUM	16.06.2019	
	DIMENZIJA	150 x 300 mm	
	FARMACODE	666; 667	
	VIZUALNI KOD		
	EAN KOD		
	FONT		
	PRIPREMA	Adobe Illustrator CS6	
BOJE:			
Pantone 2756			
Pantone 485			
Ne printa se			
Štanca			
Bez laka			
Brail			
<input checked="" type="checkbox"/>	1. ispravka	<input type="checkbox"/>	7. ispravka
	Date: 16.06.2019.		Date:
<input type="checkbox"/>	2. ispravka	<input type="checkbox"/>	8. ispravka
	Date:		Date:
<input type="checkbox"/>	3. ispravka	<input type="checkbox"/>	9. ispravka
	Date:		Date:
<input type="checkbox"/>	4. ispravka	<input type="checkbox"/>	10. ispravka
	Date:		Date:
<input type="checkbox"/>	5. ispravka	<input type="checkbox"/>	11. ispravka
	Date:		Date:
<input type="checkbox"/>	6. ispravka	<input type="checkbox"/>	12. ispravka
	Date:		Date: