

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ З МОРСЬКОЮ ВОДОЮ «СПАРКЛІН»

ТОРГОВА НАЗВА: Спрей назальний з морською водою «Спарклін».

ФОРМА ВИПУСКУ: спрей назальний.

1 алюмінієвий флакон під тиском об'ємом 125 мл (*ml*).

ОПИС: прозорий безбарвний або жовтуватий розчин.

СКЛАД:

100 г (*g*) спрею містять 100 г (*g*) стерильної ізотонічної морської води (розведеної до ізотонічної концентрації (0,9 %) водою очищеною), з додаванням 0,4 % CO₂, що створює шипучий сольовий розчин.

Спрей назальний з морською водою «Спарклін» створений на основі морської води з Гульмарсфьорден/Gullmarsfjorden, який являє собою 25-кілометровий морський фіорд, розташований на західному узбережжі Швеції, з якого водозбір здійснюється з глибини 32 м (*m*) нижче рівня моря. Після заповнення алюмінієвого флакону кінцевий продукт стерилізується з гарантією стерильності протягом всього терміну зберігання.

СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ З МОРСЬКОЮ ВОДОЮ «СПАРКЛІН» ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ:

- для очищення носової порожнини від густого секрету, кров'яних згустків, алергенів, подразнюючих речовин, сторонніх часточок, таких як пил, квітковий пилок;
- для відновлення прохідності носових шляхів та носового дихання;
- у складі комплексного лікування та з метою профілактики ГРЗ, ГРВІ, застуди, для очищення слизової оболонки носу від хвороботворних бактерій і вірусів та полегшення стану пацієнта;
- для лікування гострих та хронічних риносинуситів;
- для полегшення місцевих симптомів при гострих та хронічних риносинуситах, при гострих інфекціях верхніх дихальних шляхів. У осіб, які часто хворіють на риніти та синусити, регулярне використання спрею назального з морською водою «Спарклін» дозволяє скоротити застосування лікарських засобів;
- для лікування алергічного риніту;
- для полегшення місцевих симптомів при алергії;
- для зволоження при сухості та подразненні слизової оболонки носової порожнини;
- для гальмування утворення та дозрівання біоплівки,
- сприяє руйнуванню наявних біоплівок;
- для підготовки носової порожнини перед застосуванням інших лікарських засобів з метою очищення та видалення вмісту, який важко відділяється;
- для догляду за носовою порожниною після оперативних втручань;
- для щоденної гігієни носової порожнини.

ВЛАСТИВОСТІ СПРЕЮ НАЗАЛЬНОГО З МОРСЬКОЮ ВОДОЮ «СПАРКЛІН»:

- розріджує та виводить з носової порожнини густий секрет, кірочки, кров'яні згустки;
- шипучий сольовий розчин містить маленькі бульбашки для більш ефективного очищення від слизу, порівняно зі звичайними сольовими розчинами;
- нормалізує мукоциліарний транспорт;
- очищує слизову оболонку носа від пилу, алергенів та подразнюючих речовин;
- при застудах та алергіях розріджує та зменшує в'язкість секрету, таким чином сприяючи його виведенню;
- CO₂ створює шипучий спреї, який руйнує біоплівку, гальмує їх ріст та дозрівання;
- шляхом промивання та зрошування зменшує кількість хвороботворних мікроорганізмів на слизовій оболонці порожнини носа;

- не викликає залежності та може використовуватись з іншими лікарськими засобами;
- допомагає зменшити застосування лікарських засобів при регулярному використанні часто хворіючими ринітами та синуситами;
- допомагає у нормалізації рН назального секрету;
- не містить консервантів;
- являє собою стерильний продукт.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

1. Зняти кришку.
2. Тримаючи флакон під будь-яким кутом, обережно ввести наконечник насадки у кожную ніздрю, натиснути на 1-2 секунди.

Завдяки хімічному складу та концентрації тривалість і кратність використання спрею назального з морською водою «Спарклін» не обмежені, виріб є безпечним при тривалому застосуванні, не викликає звикання.

СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ З МОРСЬКОЮ ВОДОЮ «СПАРКЛІН» ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ для дорослих та дітей з 2-х років.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

Використання засобу більш ніж однією особою може викликати поширення інфекції, тому після кожного застосування слід вимити наконечник насадки з милом та ополоснути гарячою водою. Спрей назальний з морською водою «Спарклін» можна застосовувати в період вагітності та годування груддю.

Спрей назальний з морською водою «Спарклін» не впливає на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами та роботі з іншими механізмами.

Повідомлення про будь-який серйозний інцидент, який стався з медичним виробом

Для забезпечення подальшого ефективного та безпечного застосування медичного виробу, просимо повідомляти про побічні ефекти та інциденти, виявлені у процесі застосування цього медичного виробу, оператору ринку: АТ «Фармак», Україна, 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 63, тел. +38 (044) 239 19 40.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Спрей назальний з морською водою «Спарклін» зберігати при температурі від +15 °С до +30 °С. Захищати від сонячного світла.

Флакон під тиском: при нагріванні може вибухнути. Не проколювати і не кидати у вогонь після використання. Тримати подалі від жару, гарячих поверхонь, іскор, відкритого вогню та інших джерел займання. Не палити. Не піддавати дії температури, що перевищує 50 °С.

Не розпилювати в очі.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 3 роки з дати виготовлення. Використати до дати, зазначеної на упаковці та флаконі.

ВИРОБНИК: АТ «Фармак», Україна, 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 74.








Виготовлено Аурена Лабораторіс ЕйБі, Фьярвіксваген 22, Есі-653 50 Карлстад, Швеція/Aurena Laboratories AB, Fjarrviksvagen 22, SE-653 50 Karlstad, Sweden для АТ «Фармак», Україна.

Дата останнього перегляду. 08.11.2019 р.



UA.TR.001

Графічні символи

	Виробник		Обмеження температури		
	Оберігати від сонячного світла		Ознайомлення з інструкцією для застосування		
	Символ можливості повторного використання та перероблення (PAP – з паперу та картону; 21 – інші види картону)	<table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="padding: 2px;">STERILE</td><td style="padding: 2px;">R</td></tr></table>	STERILE	R	Стерилізовано з використанням випромінювання
STERILE	R				
	Символ «Національний знак відповідності медичних виробів»	<table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="padding: 2px;">LOT</td></tr></table>	LOT	Номер серії (партії)	
LOT					
	Використати до				