

CITO TEST® Гепатит С

Застосування: CITO TEST Гепатит С – експрес-тест для діагностики вірусного гепатиту С у домашніх умовах.

Для самоконтролю!

Загальна інформація: Гепатит С - це інфекційне захворювання, що вражає печінку і є одним з найбільш поширених видів гепатиту. Збудником захворювання є вірус гепатиту С (ВГС), який викликає як гострий перебіг інфекції так і хронічний. І гострий вірусний гепатит С, і хронічний вірусний **гепатит С на ранній стадії часто залишаються не виявленими** у зв'язку з тим, що захворювання **залишається безсимптомним протягом десятиліть!**

Гепатит С є однією з основних причин раку печінки!¹

При хронічному вірусному гепатиті ризик цирозу печінки складає 15-30% в межах 20 років.

Діагностика вірусного гепатиту С на ранньому етапі захворювання може **попередити ускладнення (цироз, рак печінки)**, котрі можуть виникнути внаслідок інфекції, та **попередити подальшу передачу вірусу.**

Важливо!!! У нашій країні рівень захворюваності на гепатит С залишається дуже високим – за підрахунками науковців, дійсна кількість захворювань перевищує офіційну статистику. А отже, **діагностику вірусних гепатитів необхідно проводити усім: людина перебуває у групі ризику до тих пір, поки не знає інфікована вона чи ні!**

В УКРАЇНІ ТІЛЬКИ 5% ІНФІКОВАНИХ НА ВІРУСНІ ГЕПАТИТИ В И С ЗНАЮТЬ ПРО СВІЙ СТАТУС!²

Переваги теста:

- **швидко:** результат через 10 хв.
- **анонімно**
- **точно – чутливість та специфічність більше 99,9%**³

Комплектація:

- тест-касета
- піпетка
- буфер
- скарифікатор (ланцет) автоматичний
- спиртова серветка (2 шт.)
- рукавички одноразові
- інструкція



ПРОСТА ПРОЦЕДУРА ТЕСТУВАННЯ ТА ОБЛІКУ



ПРОЦЕДУРА ТЕСТУВАННЯ

1



2




3



ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТУ

4

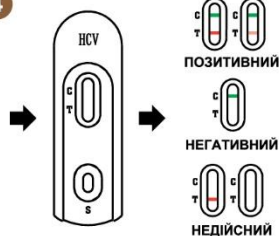

ПОЗИТИВНИЙ: з'являються дві чіткі кольорові лінії: тестова (Т) та контрольна (С). Позитивний результат – поява тестової лінії будь-якої інтенсивності – підтверджує наявність антитіл до вірусу гепатиту С в зразку капілярної крові.

НЕГАТИВНИЙ: поява однієї чіткої кольорової контрольної (С) лінії. Кольорова тестова (Т) лінія відсутня.

НЕДІЙСНИЙ: контрольна лінія (С) не з'являється.

Умови зберігання: Зберігати тест запакованим при температурі 15-30°C.
Термін зберігання – 24 міс. Не заморожувати!

1. <https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-c>

2. WHO Global health sector strategy on viral hepatitis, 2016-2021. 2016. 56 P. URL: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/246177/WHO-HIV-2016.06-eng.pdf?sequence=1>

3. Інструкція до CITO TEST Гепатит С