

CITOLAB K - діагностичні тест-полоски для напівкількісного визначення кетонів (ацетону) у сечі.

Застосування: CITOLAB K - тест-смужки діагностичні для визначення кетонів (кетонові тіла, ацетонові тіла) у зразках сечі.

Для самоконтролю!

Загальна інформація:

Навіщо діагностувати?

Ацетон (чи **кетонові тіла**) можуть з'являтися у сечі як внаслідок фізіологічного стреса – голодування, тривалих фізичних навантажень, вагітності, так і патологічних процесів – ацетонемічного синдрому у дітей, діабетичного кетоацидоза: ускладнення цукрового діабета, яке може призвести до коми та навіть смерті.

Кого тестувати?

- Дітей з багаторазовим (нестримним) блюванням
- Дітей, котрі переохворіли ацетонемічним синдромом – при нераціональному харчуванні та зловживанні фаст-фудом, сезонних спалахах ГРВІ та інфекційних захворюваннях, стресі, перевтомі
- У дорослих – при цукровому діабеті, зловживанні жирної та білкової їжі, стресі, перевтомі
- У вагітних - при токсикозі, голодуванні, інфекційних захворюваннях

Переваги використання CITOLAB K:

✓ **Мінімальний пороговий рівень визначення** – допоможе виявити Ацетонемічний синдром до появи специфічного запаху з роту!

✓ **Оптимальна кількість смужок** - завжди стане в нагоді у домашній аптечці!

✓ **Максимальний термін зберігання** – ще протягом 6 місяців після відкриття упаковки можна використовувати!

Постійний контроль наявності кетонів у сечі допоможе попередити розвиток важкого нападу - Ацетонемічного синдрому!

✓ **Швидкість отримання результату** - оцінити результат можна вже через 1 хвилину!

Комплектація:

- 50 тест-смужок з вологопоглиначем у контейнері
- інструкція

Процедура тестування:

1. Занурте тестову ділянку смужки в сечу на 2 сек.

2. Проведіть ребром смужки по краю ємності, щоб видалити залишки сечі (не торкатися тестовою зоною смужки!!!)

2. Тримайте смужку горизонтально, промокніть її адсорбуючим матеріалом для видалення залишків сечі.

3. Оцінку результату провести через 60 сек.

ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ

нег.	±5(0.5)	+15(1.5)	++40(3.9)	+++100(10)	мг/дл (ммоль/л)
------	---------	----------	-----------	------------	-----------------

Умови зберігання: Зберігати тест запакованим при температурі 15-30°C. Термін зберігання – 24 міс. Не заморожувати!