

CITOLAB pH - діагностичні тест-смужки **для визначення pH вагінальних виділень.**

Застосування: CITOLAB pH - тест-смужки діагностичні для визначення pH вагінальних виділень.

Для самоконтролю!

Загальна інформація:

Навіщо діагностувати?

Мікрофлора піхви зазвичай знаходиться у збалансованому стані: переважають лактобактерії, які створюють кисле середовище (нормальні значення вагінального pH знаходяться в межах 4,0-4,4). Це є природним захистом від потрапляння і розмноження хвороботворних мікроорганізмів.

В більшості випадків pH виділень змінюється при вагінальних інфекціях і може бути **діагностичним маркером захворювань жіночої статеві системи вже на ранніх стадіях.**

Кого тестувати?

- За наявності рідких вагінальних виділень з неприємним запахом, свербіжжю
- При рецидивуючих інфекціях

Переваги використання CITOLAB pH:


- ✓ **швидко** – через 20 сек.
- ✓ **зручно**
- ✓ **в домашніх умовах**

Комплектація:

- тест-смужка та осушувач в індивідуальній упаковці
чи
- 25 тест-смужок та осушувач у контейнері
чи
- 50 тест-смужок та осушувач у контейнері
- інструкція

Процедура тестування:

1. Вийняти тест-смужку з упаковки безпосередньо перед тестуванням.
2. Провести забір зразка вагінального секрету.
3. За допомогою палички декілька разів змочити вагінальним секретом тестову зону смужки.
4. Через 20 сек. оцінити результат, співставивши змінений колір тестової зони зі шкалою кольорів на упаковці.

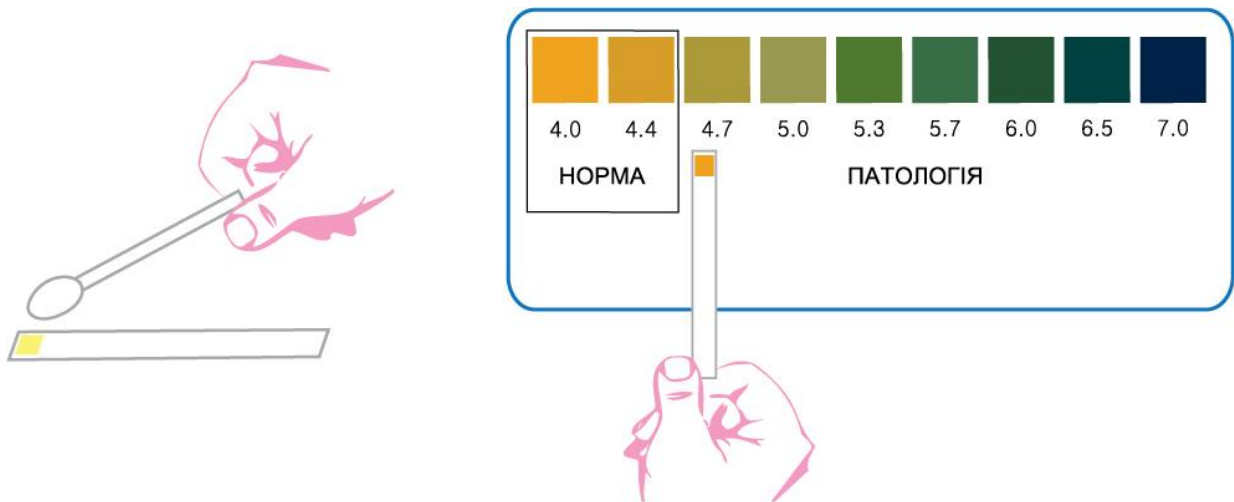

Умови зберігання: Зберігати тест запакованим при температурі 15-30°C. Термін зберігання – 24 міс. Не заморожувати!