

## FARMACTIVE® Нон адеренте

### Українська

FARMACTIVE® Нон адеренте – пористий, атравматичний шар для контакту з ранною, складається із гнучкої поліестерової сітки, покритої м'яким липким силіконовим гелем із двох сторін.

Силіконове покриття є трохи липким, що покращує застосування пов'язки і прилипання до шкіри навколо рани. Це легке приклеювання запобігає мацерації та стримує рух виділень з рани на шкіру. М'який силікон забезпечує безболісне та не травматичне виділення пов'язки для свіжої молодшої шкіри. Пов'язка не поглинаюча, але містить отвори і пори, що дозволяє проникнення ексудату у вторинну поглинаючу пов'язку. **Особливості**

- прозора для легкого контролю рани протягом застосування і під час носіння.
- Не прилипає, щоб зволожувати раневе ложе, однак липне до здорової шкіри.
- Атравматичне і безболісне зняття: можна зняти без болю або пошкодження нижніх нових тканин.
- Пори: дозволяють виводитися ексудату до вторинної пов'язки, що мінімізує мацерацію.

### Покази до використання

FARMACTIVE® Нон адеренте застосовується для догляду ран, де слід уникати приклеювання до тканин. Типове застосування включає розриви тканин чи абразії, хірургічні пошкодження, опіки першого і другого ступеня, змозолістості та лацерації, графти, венозні та пролижневі виразки, діабетичні виразки і пошкодження шкіри після радіотерапії і стероїдної терапії.

### Протипокази

FARMACTIVE® Нон адеренте не призначається для використання на інфікованих ранах. Запобіжні заходи

Як і зі всіма типами пов'язок, рану слід регулярно оглядати на ознаки інфекції і погіршення стану. Коли застосовується при кровоточивих ранах, або при ранах, що виділяють велику кількість в'язкого ексудату, пов'язка повинна бути вкрита вологою поглинаючою пов'язкою.

### Інструкції щодо використання

1. Очистити рану, осушити шкіру довкола.
2. Видалити смужки з двох сторін пов'язки.
3. Застосувати пов'язку, покриваючи рану повністю та шкіру довкола на 2 сантиметри далі. Якщо необхідно, можна вирізати потрібну форму або розмір перед зняттям захисної плівки. Якщо потрібно більше ніж одна частина пов'язки, пов'язки можуть частково заходити одна на одну, але не блокуючи пори.
4. Розгладити і забезпечити хороше закріплення.
5. Вкрити вторинною пов'язкою, відповідно до інтенсивності виділень, наприклад, FARMACTIVE® Ск'юма ПУ, у випадку рясних виділень, або FARMAPORE® у випадку мінімальних виділень.

Зміна пов'язки: FARMACTIVE® Нон адеренте може використовуватись до 7 днів за умови частішої заміни вторинного покриття.

### Зберігання

Зберігати в прохолодному, сухому місці. Тримати в захищеному місці від дітей.

Не використовуйте повторно. Не стерилізуйте повторно.

Не використовуйте, якщо індивідуальна упаковка пошкоджена/відкрита. Використати до дати, зазначеної на упаковці.

Останній перегляд тексту: 06/2020 Ver. 02

**СТЕРИЛЬНО**  
стерильно до  
моменту відкриття  
упаковки

Уповноважений представник в Україні ТОВ "БМЦ"



UA.TR.099



вул. Гріга, 3, м. Тернопіль,  
Тернопільська обл.,  
Україна, 46020  
тел.: +380678824190  
e-mail: info@bmc-ua.com



ФАРМАК-ЗАББАН СПА  
Віа Персичетана, 26 - 40012  
Кальдерара-ді-Рено,  
Болонья - Італія  
www.farmacabban.com  
company@farmacabban.com

### Символи зазначені на етикетці



- одноразове застосування



- використати до : рік і місяць



- метод стерилізації



- номер партії



- увага, дивися інструкції перед застосуванням

У разі будь-якої несправності або погіршення характеристик та / або властивостей виробу, у разі будь-яких побічних наслідків споживачі повинні інформувати виробника та Державну службу України з питань контролю за лікарськими засобами та наркотичними середниками, проспект Перемоги, 120-А, Київ, 03115, Україна, електронна пошта: dls@dls.gov.ua, (ДЛС України, <http://www.dls.gov.ua/>)