

FARMACTIVE® Силікон комфорт

Українська

Опис виробу

FARMACTIVE® Силікон комфорт є стерильною багатошаровою поліуретановою губчастою пов'язкою, з бортом або без, що складається із чотирьох шарового гідрофільного покриття для догляду за ранами та сорбції екссудату. Контактний шар м'якого силікону покриває всю робочу поверхню виробу, що дозволяє легко накладання та атравматичне зняття, що в свою чергу зменшує біль та пошкодження. Силіконове покриття унеможливує мацерацію країв шкіри.

Покази до використання

FARMACTIVE® Силікон комфорт призначений для догляду ран із помірною і великою екссудацією, таких як:

- Пролежні, рани з частковим або повним ушкодженням шкіри, хірургічні рани, венозні виразки, донорські ділянки шкіри, виразки діабетичної стопи

Протипокази

FARMACTIVE® Силікон комфорт не призначається для використання у наступних випадках:

- опіки третього ступеня, сухі рани, сильно кровоточиві рани

Запобіжні заходи

Не застосовувати для пацієнтів із чутливістю до поліуретанової мембрани чи силікону.

Інструкції щодо використання

1. очистіть рану відповідно стандартів лікування.
2. осушіть шкіру довкола перед застосуванням пов'язки.
3. розташуйте по центрі та застосуйте її на рані, щоб покрити не менше 2см шкіри довкола рани.
4. не потребує додаткової фіксації. Пов'язка може бути змита при потребі між змінами для огляду рани, враховуючи її ніжні адгезивні властивості.

Зміна і зняття пов'язки

1. FARMACTIVE® Силікон комфорт може застосуватися протягом 4-5 днів і навіть до 7 днів, залежно від стану пацієнта та рівня виділень та стану шкіри довкола.

Зберігання

Зберігайте в прохолодному, сухому місці, подалі від сонця та полум'я.

Не використовувати повторно. Не стерилізувати повторно.

Не використовувати, якщо індивідуальна упаковка пошкоджена/відкрита.

Використати до дати, зазначеної на упакованні.

Останній перегляд тексту: 06/2020 Ver. 02

СТЕРИЛЬНО
стерильно до
моменту відкриття
упаковки

Уповноважений представник в Україні ТОВ "БМЦ"



UA.TR.099



вул. Гріга, 3, м. Тернопіль,
Тернопільська обл.,
Україна, 46020
тел.: +380678824190
e-mail: info@bmc-ua.com



ФАРМАК-ЗАББАН СПА
Віа Персичетана, 26 - 40012
Кальдерара-ді-Рено,
Болонья - Італія
www.farmaczabban.com
company@farmaczabban.com

Символи зазначені на етикетці



- одноразове застосування



- використати до : рік і місяць



- метод стерилізації



- номер партії



- увага, дивися інструкції перед застосуванням

У разі будь-якої несправності або погіршення характеристик та / або властивостей виробу, у разі будь-яких побічних наслідків споживачі повинні інформувати виробника та Державну службу України з питань контролю за лікарськими засобами та наркотичними середниками, проспект Перемоги, 120-А, Київ, 03115, Україна, електронна пошта: dls@dls.gov.ua, (ДЛС України, <http://www.dls.gov.ua/>)