


Кроки з налаштування пристрою, встановлення часу та дати

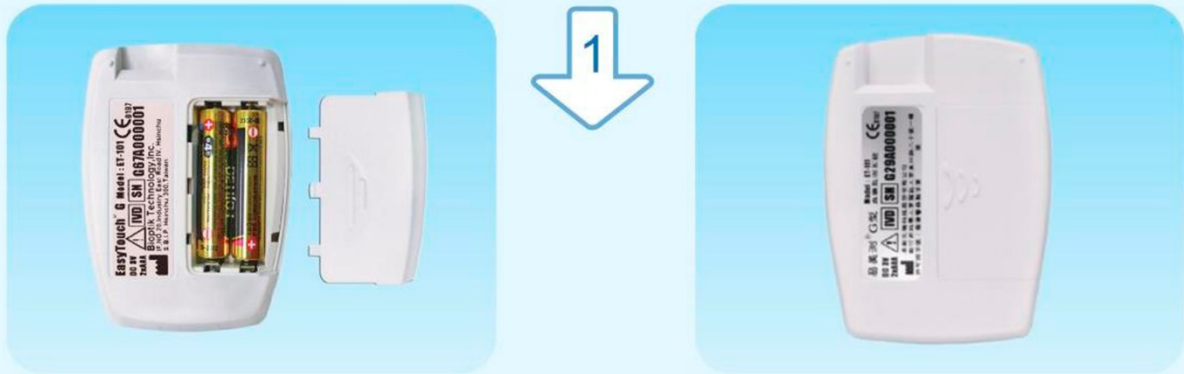

Прилад увімкнеться автоматично.



На екрані висвітиться рік.
Натисніть S, щоб виставити поточний рік.



Натисніть M, щоб перейти до налаштувань місяця.

На екрані з'явиться місяць.

Натискайте S, щоб виставити поточний місяць.

Повторіть попередні кроки, щоб виставити дату, години та хвилини.

Перевірка одиниць вимірювання

Рівень глюкози та холестерину в крові визначається в мг/дл або ммоль/л.

Для цього лише необхідно виставити перемикач у відсіку для батареї:

	Положення "ліворуч"		Положення "праворуч"	
	Одиниця вимірів	Десятична кома	Одиниця вимірів	Десятична кома
Глюкоза	мг/дл	Ні	ммоль/л	Так
Холестерин	мг/дл	Ні	ммоль/л	Так

Перевірка апарата контрольною тест-смужкою

Вставте контрольну (калібрувальну) тест-смужку в слот для тест-смужки на апараті.

На дисплеї має з'явитись повідомлення «ОК» - прилад працює справно).



Проведіть аналіз

Кроки з використання ланцетного пристрою

1



Відкрутіть наконечник ланцетного пристрою



2



Вставте ланцет



3



Відкрутіть захисний ковпачок на ланцеті



4



Прикрутіть наконечник ланцетного пристрою



5



Встановіть глибину проколу




6



Потягніть за рухому частину ланцетного пристрою



7

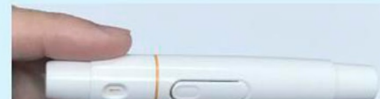

Після того, як почуєте клацання, відпустіть



Помістіть проколюючий пристрій на палець та натисніть на активатор проколюючого пристрою



8

Проведіть аналіз

Вилучення ланцету



1

Відкрутіть наконечник ланцетного пристрою



2

Вийміть використаний ланцет із пристрою

Кроки з вимірювання глюкози, холестерину, сечової кислоти

Кроки з вимірювання рівня глюкози



Перевірте номер коду

Число на ключі кодування повинно співпадати з номером на контейнері з тест-смужками



Вставте кодовий ключ



Автоматичне включення
Вставте тест-смужку



Отримайте краплю крові



Піднесіть краплю крові до тест-смужки



6 секунд

Тест-смужка поглинає кров і зона для зразків стає червоною



Після звукового сигналу апарату почнеться реакція

Кроки з вимірювання рівня холестерину



150 секунд

Кроки з вимірювання рівня сечової кислоти



6 секунд

Для проведення тесту на холестерин покладіть пристрій на плоску горизонтальну поверхню

Для аналізу використовуйте другу краплю крові з кінчика пальця.