

Слуховий апарат CLEARSTONE H50



Інструкція з експлуатації

Шановний клієнт!

Наш прилад – чудовий пристрій для людей, які хочуть чути краще.

Будь ласка, уважно прочитайте Посібник користувача перед використанням слухового апарату. Це допоможе вам правильно експлуатувати та обслуговувати пристрій, що суттєво продовжить термін його служби.

Якщо у вас виникнуть питання, зателефонуйте до нашого Центру обслуговування клієнтів. Наші представники обов'язково допоможуть.

Основна інформація про прилад

Назва: Слуховий апарат CLEARSTONE

Модель: H50

Конструкція пристрою: Слуховий апарат складається з основного блоку, кабельних навушників та берушів.


Принцип роботи: Звуковий сигнал вловлюється мікрофоном, трансформується в цифровий сигнал, обробляється процесором, перетворюється назад на акустичний сигнал і передається користувачеві через динаміки.

Сфера застосування: Компенсація слуху для пацієнтів із втратою слуху через повітряну провідність.

Противопоказання: Гострий зовнішній отит, хронічний гнійний отит, гострий гнійний отит, алергія на матеріал.

1

Конструкція

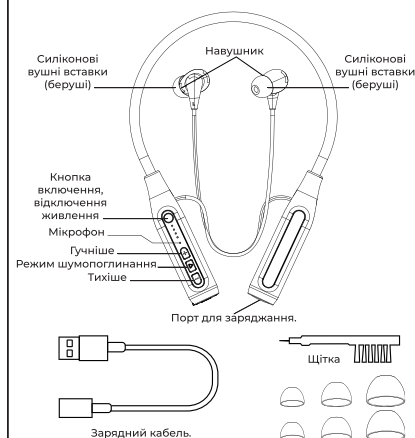

2


Специфікація

Допустимі умови роботи пристрою	
Температура навколишнього середовища	0° - 40°С
Відносна вологість	≤ 80%
Алкогольний тиск	98kPa + 106kPa
Тиск внаслідок падіння	≤ 3,7kPa
Електроакустичні характеристики приладу	
Максимальна СРЗ/СРЗ	95 дБ ± 3 дБ
Рівень звукового тиску на виході (Середнє значення високої частоти)	94 дБ ± 4 дБ
Повищене посилення звуку (Середнє значення високої частоти)	95 дБ ± 5 дБ
Середній рівень відносного шуму	99 дБ ± 3 дБ
Діапазон частотних характеристик (не більше ніж)	400 Гц - 4700 Гц
Акумуляторна батарея	Li-Ion (опціональний акумулятор)
Ємність	240 мАг
Номінальний робочий струм	6 мА

3

Підготовка до роботи

Виберіть відповідний розмір берушів (S, M, L) з комплекту та надягніть їх на головку навушників.

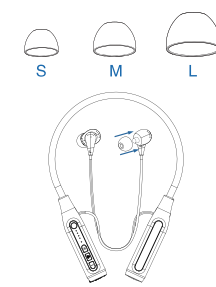


4

Інструкції з користування


1

Одягніть прилад на шию, вставте навушники у вушний отвір.

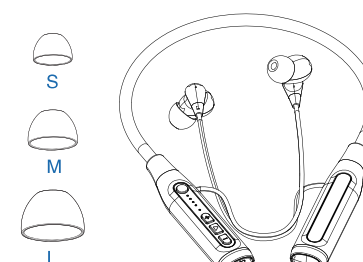

5

2

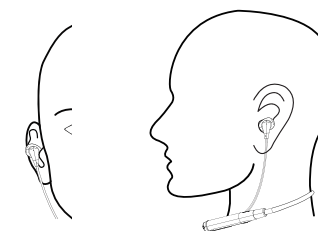


Повільно проштовхуйте навушник у вушний отвір, доки він не наблизиться до слухового каналу

6


3

Утримуйте кнопку **ON/OFF** протягом 3 секунд, щоб увімкнути пристрій.

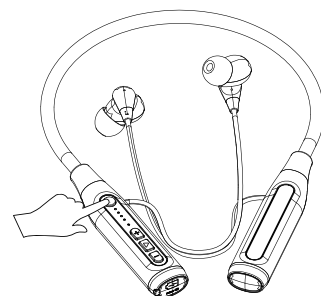

7

4

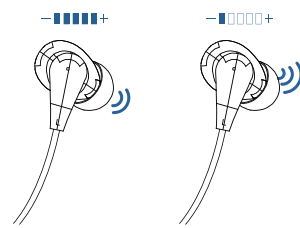


Будь ласка, не закривайте отвір мікрофона руками під час регулювання, інакше це викличе свист.

8


5

Перебуваючи в шумному середовищі, ви можете натиснути клавішу режиму шумопоглинання, щоб перейти в режим зменшення шуму.

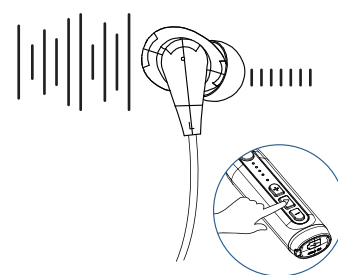

9

6

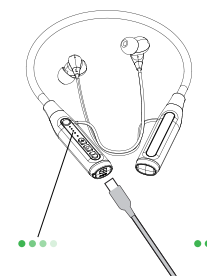

Для зарядження слухового апарату знадобиться мережевий зарядний пристрій з рекомендованою потужністю **5V 1A** (в комплект не входить). Під'єднайте USB-кабель до мережного зарядного пристрою, інший кінець кабелю під'єднайте в роз'єм слухового апарату та підключіть зарядний пристрій до мережі. Під час зарядження індикатор буде блимати, а коли всі чотири індикатори горять, це означає, що пристрій повністю заряджений.

10

Рекомендації до використання

- Перед початком користування приладом необхідно пройти професійний огляд та перевірку слуху у лікаря.
- Не занурюйте пристрій у воду. Перед купанням або миттям волосся зніміть слуховий апарат. Після купання зачекайте, поки не висохне слуховий прохід і лише потім встановлюйте прилад.
- Після того, як ви знімете слуховий апарат на ніч, його слід зарядити, уникаючи впливу яскравого світла, високої температури та вологості.
- Зовнішня поверхня слухового апарату має бути чистою. Також регулярно необхідно чистити беруші від вушної сірки.
- Якщо під час користування приладом ви відчуєте дискомфорт, припиніть його використання.
- Якщо слуховий апарат не використовується протягом тривалого часу, батарея може розрядитися через наявність внутрішнього опору. Якщо прилад не вмикається, переконайтеся, що він повністю заряджений.

11

- Забароняється кидати або упускати прилад, оскільки це може призвести до пошкодження внутрішніх компонентів.
- Слуховий апарат заборонено використовувати при високочастотній та променевої терапії, а також у місцях, де діють сильні магнітні поля.
- Ніколи не використовуйте прилад у потенційно вибухонебезпечному середовищі.
- Слуховий апарат не можна викидати разом із побутовими відходами. Прилад підлягає утилізації на спеціалізованих станціях.
- Не дозволяйте дітям грати з пристроєм та аксесуарами до нього. Це дозволить уникнути травм або пошкоджень приладу.

Способи транспортування та зберігання

- Захищайте прилад від впливу на нього прямих сонячних променів та вологи.
- Зберігайте у прохолодному та сухому місці.
- Не допускайте механічних пошкоджень або сильного удару приладу.

12

Обслуговування пристрою

- Будь ласка, заряджайте слуховий апарат вчасно, щоб було достатньо енергії для використання.
- Використовуйте чисту м'яку тканину для очищення корпусу приладу.
- Чистіть та продезинфікуйте вушні беруші чистою теплою водою.

Немає звуку: що робити?

- Налаштуйте гучність кілька разів, щоб переконаватися, що у приладі є звук.
- Перед увімкненням переконайтеся, що пристрій повністю заряджений і повторіть крок 1.
- Якщо попередні рекомендації не допомогли, можна зробити висновок, що слуховий апарат не працює належним чином або несправний. У такому разі зверніться до центру обслуговування клієнтів для допомоги та вирішення питання.

13

Чуєте свистячий звук у вусі: що робити?

- Переконайтеся, що слуховий апарат встановлений у вушний отвір герметично та до кінця.
- Використовуйте беруші іншого розміру, переконайтеся, що вони не деформовані.
- Переконайтеся, що немає багато скупчення вушної сірки. При необхідності видаліть її.
- Переконайтеся, що слуховий апарат розташований правильно (не вгору ногами).

Комплектація

Слуховий апарат: 1 шт.
Шнурок для фіксації приладу: 1 шт.
Зарядний кабель: 1 шт.
Беруші: комплект S, M, L.
Щітка для чищення: 1 шт.
Інструкція з експлуатації: 1 екз.

Дякуємо, що обрали CLEARSTONE

14