

Слуховий апарат CLEARSTONE S30



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Шановний клієнт!

Наш прилад – чудовий пристрій для людей, які хочуть чути краще.

Будь ласка, уважно прочитайте Посібник користувача перед використанням слухового апарату. Це допоможе вам правильно експлуатувати та обслуговувати пристрій, що суттєво продовжить термін його служби.

Якщо у вас виникнуть питання, зателефонуйте до нашого Центру обслуговування клієнтів. Наші представники обов'язково допоможуть

Основна інформація про прилад

Назва: Слуховий апарат CLEARSTONE

Модель: S30

Розмір: 55 x 38 x 16 мм


Конструкція пристрою: Слуховий апарат складається з основного блоку, акумулятора та берушів.

Принцип роботи: Звуковий сигнал вловлюється мікрофонами, трансформується в цифровий сигнал, обробляється процесором, перетворюється назад на акустичний сигнал і передається користувачеві через динамік.

Противопоказання: Гострий зовнішній отит, хронічний гнійний отит, гострий гнійний отит, алергія на матеріал.

1

Конструкція

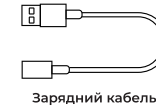

2


Специфікація

| Допустимі умови роботи пристрою | |
|--|-----------------------------------|
| Температура навколишнього середовища: | 0° - 40°C; |
| Відносна вологість: | < 80%; |
| Атмосферний тиск: | 86кПа - 106кПа; |
| Робоча напруга: | 3,7 В; |
| Електроакустичні характеристики приладу | |
| Максимальний OSPL90: | менше 133 дБ ± 3 дБ; |
| Рівень звукового тиску на виході (Середнє значення високої частоти): | 129 дБ ± 4 дБ; |
| Повномасштабне посилення звуку (Середнє значення високої частоти): | 35 дБ ± 5 дБ; |
| Еквівалентний рівень відного шуму: | 32 дБ ± 3дБ; |
| Діапазон частотної характеристики (не більше ніж): | 400 Гц - 4700 Гц; |
| Акумуляторна батарея: | Li-ion (літій-іонний акумулятор); |
| Ємність: | 50 мАг; |
| Номинальний робочий струм: | 6 мА; |

3


Підготовка до роботи

Виберіть відповідний розмір берушів (S, M, L) з комплекту та надягніть їх на головку слухового апарату. Якщо ви відчуваєте, що беруші не вставляються у вушний канал щільно, спробуйте використати виріб іншого розміру.

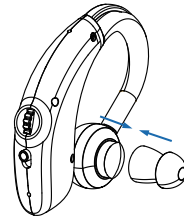

4

Початок роботи

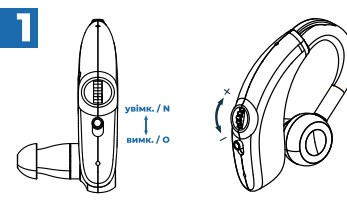


1. Перемістіть перемикач у положення «Увімк.» / «N», щоб увімкнути слуховий апарат.

2. За допомогою регулятора відрегулюйте гучність до комфортного рівня (перед встановленням приладу у вушний канал, рекомендується встановити мінімальну гучність).

5

3

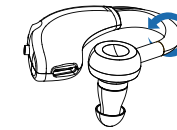

3. Повертаючи вакуумну трубку, адаптуйте слуховий апарат для носіння на лівому або правому вусі.

4. Для встановлення слухового апарату утримуйте беруші великим і вказівним пальцями та акуратно вставте у слуховий прохід до кінця. Для якісної установки беруші, натисніть на задню частину вуха, після чого закріпіть слуховий апарат за вухом.

5. Щоб зарядити пристрій, підключіть зарядний кабель до відповідного гнізда на приладі. Якщо індикатор зарядження світиться, значить слуховий апарат заряджається. Коли індикатор згасне, пристрій повністю заряджений і готовий до роботи. Перед зарядженням, слуховий апарат необхідно вимкнути за допомогою перемикача, перевівши його в положення «Вимк.» / «O»

6

Рекомендації до використання

- Перед початком користування приладом необхідно пройти професійний огляд та перевірку слуху у лікаря.
- Не занурюйте пристрій у воду. Перед купанням або миттям волосся зніміть слуховий апарат і покладіть його у футляр. Після купання зачекайте, поки не висохне слуховий прохід і лише потім встановлюйте прилад.
- Після того, як ви знімете слуховий апарат на ніч, його слід зарядити, уникаючи впливу яскравого світла, високої температури та вологості.
- Зовнішня поверхня слухового апарату має бути чистою. Також регулярно необхідно чистити беруші від вушної сірки.
- Якщо під час користування приладом ви відчуваєте дискомфорт, припиніть його використання.
- Якщо слуховий апарат не використовується протягом тривалого часу, батарея може розрядитися через наявність внутрішнього опору. Якщо прилад не вмикається, переконайтеся, що він повністю заряджений.

7

7. Забороняється кидати або упускати прилад, оскільки це може призвести до пошкодження внутрішніх компонентів.
8. Слуховий апарат заборонено використовувати при високочастотній та променевої терапії, а також у місцях, де діють сильні магнітні поля.
9. Ніколи не використовуйте прилад у потенційно вибухонебезпечному середовищі.
10. Слуховий апарат не можна викидати разом із побутовими відходами. Прилад підлягає утилізації на спеціалізованих станціях.
11. Не дозволяйте дітям грати з пристроєм та аксесуарами до нього. Це дозволить уникнути травм або пошкоджень приладу.

Рекомендації до зарядження пристрою

1. Не використовуйте адаптер високої потужності для зарядження слухового апарату. Рекомендована потужність адаптера не повинна перевищувати 5V/1A.
2. Не допускайте тривалого розряду пристрою, це може призвести до втрати властивостей акумулятора.

8

Немає звуку: що робити?

1. Налаштуйте гучність кілька разів, щоб переконаватися, що у приладі є звук;
2. Перед увімкненням переконайтеся, що пристрій повністю заряджений і повторіть крок 1;
3. Якщо попередні рекомендації не допомогли, можна зробити висновок, що слуховий апарат не працює належним чином або несправний. У такому разі зверніться до центру обслуговування клієнтів для допомоги та вирішення питання.

Чуєте свистячий звук у вусі: що робити?

1. Переконайтеся, що слуховий апарат встановлений у вушний отвір герметично та до кінця.
2. Використовуйте беруші іншого розміру, переконайтеся, що вони не деформовані.
3. Переконайтеся, що немає багато скупчення вушної сірки. При необхідності видаліть її.
4. Переконайтеся, що слуховий апарат розташований правильно (не вгору ногами)

9

Способи транспортування та зберігання

1. Захищайте прилад від впливу на нього прямих сонячних променів та вологи.
2. Зберігайте у прохолодному та сухому місці.
3. Не допускайте механічних пошкоджень або сильного удару приладу.

Комплектація

Слуховий апарат: 1 шт
Зарядний кабель: 1шт.
Беруші: комплект S, M, L.
Щітка для чищення: 1
Інструкція з експлуатації: 1 екз.

Дякуємо, що обрали CLEARSTONE

10